

## **INSTRUCCIONES FRAT TEST - LATINOAMERICA**

- 1) Regístrese en [www.eneviahealth.com](http://www.eneviahealth.com)
- 2) Pague la membresía- 25 Eur anuales.
- 3) Diríjase a la página de su país y haga la compra.

Una vez hecha la compra del test recibirán un email con los siguientes formularios Formulario 4 (formulario de solicitud) y el formulario 5 (formulario de liberación) y unas plantillas del formulario con las traducciones al castellano.

### 4) Formulario de solicitud

Obtenga la firma del médico prescriptor en el formulario.

El médico puede firmar el formulario físicamente y luego enviar una copia escaneada a los padres para completar su parte.

Incluso si el médico está en EE. UU., Este sistema seguirá siendo el mismo.

Necesitamos todos los datos, incluido el correo electrónico del médico, para poder enviarle el informe tan pronto como esté listo.

Si no dispone de médico prescriptor contáctenos y le proporcionaremos los formularios firmados por un médico de Enevia Health, el email de contacto es [info@eneviahealth.com](mailto:info@eneviahealth.com)

### 5) Formulario de liberación

Los padres deben rellenar este formulario para que el informe de los resultados se les mande tan pronto como esté listo.

### 6) Sección de pago del formulario de solicitud

Deben mencionar "Bill to Enevia Health" (La factura la paga ENEVIA HEALTH)

7) Una vez comprado el test, póngase en contacto con nuestros colaboradores en su país para que le indiquen como proceder, encontrará el listado en la misma sección de la web donde compró el test.

### 8) Cómo tomar la muestra de sangre.

**Instrucciones para el laboratorio que hará la extracción de la sangre.**

a) Deben usar el siguiente tubo para extraer sangre -SST VACUTAINER

Ejemplo del tipo de tubo que se debe usar.

[https://www.tigermedical.com/Products/Vacutainer-SST-Transport-Tube\\_BD367985-.aspx?invsrsrc=adwords\\_tm&gclid=Cj0KCQjwh\\_eFBhDZARIsALHjIKc1gOJbqgPY\\_6fMIFbxN4T](https://www.tigermedical.com/Products/Vacutainer-SST-Transport-Tube_BD367985-.aspx?invsrsrc=adwords_tm&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKc1gOJbqgPY_6fMIFbxN4T)

b) Cuando se ha extraído la sangre. Invierta suavemente el tubo varias veces. Permita que el suero se coagule y separe los glóbulos rojos del suero por centrifugación (de 1500 a 2000 rpm durante 15 a 20 minutos)

c) Transfiera el suero (ÚNICAMENTE) al tubo de transferencia.

8) Envío de la muestra al laboratorio de Estados Unidos.

La muestra es estable y se puede mandar siguiendo las siguientes instrucciones.

Use una caja de poliestireno, añádale 3 ICE PACKS, bolsas de hielo de 100 g cada una, recuerde que debe congelarlas al menos 24 h antes de usarlas.

Use la opción de envío urgente

Dirección de envío de la muestra

Illiad Neuroscience Inc.  
5110 Campus Drive  
Suite #150 Plymouth Meeting  
PA 19462  
Tel.6104419050  
Info@iliadneuro.com