



ENEVIA
HEALTH



ENEVIA HEALTH S.L

CIF B90477753

AVENIDA DIEGO MARTIN BARRIO 4,

EDIFICIO VIAPOL CENTER OFICINAS

41013 SEVILLA

ESPAÑA

Instrucciones para la toma de la muestra

1. Después de defecar, límpiese normalmente. Pase el hisopo suavemente sobre el papel higiénico para recolectar una muestra aproximadamente del tamaño de un grano de arroz.
2. Coloque el hisopo dentro del tubo y revuelva enérgicamente durante 30 segundos. Retire y deseche el hisopo.
3. Vuelva a colocar la tapa del tubo firmemente y agite vigorosamente durante 10 segundos.

Envuelva el tubo en el papel secante, colóquelo en la bolsa de plástico. Selle la bolsa.

Kit de registro

Inicie sesión y registre el ID del kit en biomesight.com/sample/register. La identificación del kit se puede encontrar en la bolsa de plástico o en el borde posterior del correo de devolución.

Instrucciones de empaque

1. Vuelva a colocar la muestra en el embalaje original (debajo de la solapa).
2. Selle de forma segura quitando la tira de plástico. Presione firmemente contra el borde exterior.

Envío conjunto

Hay que mandar las muestras a la Fundación Bio Abordajes del Autismo:
José Cubas 3248, entre Cuenca y Campana. Villa Pueyrredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1419)

Envío individual

Aquellas personas que quieran enviar directamente su kit a USA,
la dirección del laboratorio es:
Jin Liang Li, Laragen, Inc, 10601 Virginia Ave, Culver City, CA 90232, USA

2. Para obtener consejos sobre cómo completar el formulario de aduanas, visite biomesight.com/customs